



pH Neutral – Informații referitoare la produs


Descriere produs

Soluția pentru clătirea ochilor pH Neutral oferă o clătire de 2 minute în cazul accidentelor provocate de substanțe acide și alcaline. Capacul ergonomic al flaconului asigură clătirea ochilor cu un jet ușor și constant. În timpul clătirii apăsați ușor flaconul! Design-ul special al flacoanelor permite clătirea ambilor ochi simultan. Soluțiile noastre pentru clătirea ochilor sunt considerate dispozitive medicale, în conformitate cu Directiva UE 93/42 /CEE. Fișa cu date de securitate relevantă poate fi descărcată de pe site-ul nostru web.



În ce situații se recomandă utilizarea soluției pH Neutral?

Soluția pentru clătirea ochilor pH Neutral este o soluție tampon de fosfat de 4.9% care neutralizează în mod eficient substanțele acide și alcaline, respectiv ajută cât mai curând posibil la restabilirea valorii pH-ului natural al ochilor. Apa curată sau soluția salină sterilă 0,9% numai diluează aceste materiale (Figura 1.), însă nu poate reduce efectul coroziv al acestora. După utilizarea produsului pH Neutral, recomandăm continuarea clătirii cu Soluția pentru clătirea ochilor Plum cu conținut de soluție salină 0,9%, până se ajunge la medic! **IMPORTANT!** În caz de leziuni oculare consultați întotdeauna un medic!

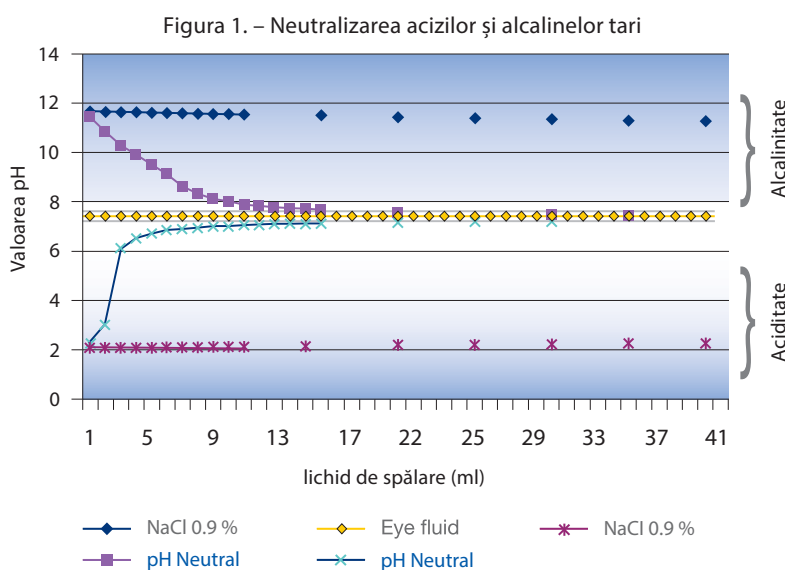

Prezentul test a fost efectuat la laboratorul Plum A/S (in vitro). Pe parcursul testelor s-a adăugat pH Neutral și soluție de clorură de sodiu 0,9%, într-un amestec constând din 1 picătură de acid sulfuric + 1 picătură de hidroxid de potasiu dizolvat în 40 ml apă + 40 ml de apă. S-a măsurat modificarea valorii pH-ului și cantitatea lichidului de spălare utilizat.

pH Neutral – Informații referitoare la produs



Beneficiile soluției pentru clătirea ochilor:

- Nivel ridicat de funcționalitate: flacoanele sunt fabricate în conformitate cu certificarea DIN EN 15154-4.
- Soluție flexibilă: flacoanele sunt disponibile în mai multe dimensiuni, pot fi utilizate și în stații de lucru mobile, dar pot fi montate și pe perete ca parte a unei stații pentru clătirea ochilor.
- Posibilități variate de utilizare (de ex. în sectorul industrial, laboratoare, ca parte a unei truse de prim ajutor, utilizare mobilă în vehicule, etc.)
- Este ușor de utilizat - persoana care a suferit leziuni poate folosi soluțiile pentru clătirea ochilor și singur, fără ajutor.
- Termenul de valabilitate al produsului în stare închisă este de 3 ani.
- Flacoanele nu necesită întreținere, nici schimbul lichidului.

Cum se utilizează soluția pentru clătirea ochilor Plum?



Scoateți flaconul din stație.



Rotiți capacul în direcția indicată de săgeată, până când se rupe dispozitivul de blocare.



Înclinați-vă capul în spate, și începeți clătirea ochilor.



Puteți să clătiți și dacă vă înclinați capul puțin în față, astfel lichidul nu va scurge pe haine.

Instrucțiuni de utilizare

Produsul poate fi utilizat doar de o singură dată! A nu se utiliza după data de expirare (a se vedea data de expirare pe etichetă)! Este important ca dispozitivul de blocare de pe capac să nu fie deteriorat, deoarece numai astfel se poate asigura clătirea sterilă. În cazul în care dispozitivul de blocare este deja deteriorat, să nu utilizați din nou produsul, deoarece există un risc de infecție!

Prezentare

Volum	200 ml	500 ml Duo	1000 ml pulverizator pentru ochi
Cod produs	4691	4604	4707
Durată clătire	aprox. 2 min.	aprox. 2 min. / ochi	aprox. 2 min.
Dimensiuni	165 x ø 55 mm	220 x ø 75 mm	270 x ø 85 mm